

INSTRUÇÃO DE USO

Optive® ADVANCE

Carmelose sódica

Glicerol

Hialuronato de sódio

Sem conservantes

Solução oftálmica estéril

Lubrificante e protetor para os olhos

USO ADULTO

APRESENTAÇÃO

Optive® ADVANCE é embalado em frasco multidose sem conservantes contendo 10 mL de solução oftálmica estéril para administração oftálmica.

COMPOSIÇÃO

Optive® ADVANCE contém: carmelose sódica, glicerol, hialuronato de sódio, eritritol, levocarnitina, ácido bórico, borato de sódio decaidratado, citrato de sódio di-hidratado, cloreto de potássio, cloreto de cálcio di-hidratado, cloreto de magnésio hexaidratado, hidróxido de sódio se necessário para ajuste de pH e água purificada.

INDICAÇÕES

Optive® ADVANCE é indicado para lubrificar a superfície dos olhos e ajudar a fornecer alívio temporário de ressecamento, irritação, queimação, desconforto e/ou quaisquer outros sintomas causados pela doença do olho seco ou fatores ambientais.

CONTRAINDICAÇÕES

Optive® ADVANCE é contraindicado em pacientes com hipersensibilidade a qualquer ingrediente deste produto.

REAÇÕES ADVERSAS

As seguintes reações adversas foram identificadas durante a pós-comercialização do **Optive® ADVANCE** na prática clínica: Secreção ocular, irritação ocular, edema das

pálpebras, sensação de corpo estranho nos olhos, aumento do lacrimejamento, inchaço ocular e hipersensibilidade.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Não ingerir a solução. Para evitar contaminação ou possível lesão ocular, não toque a ponta do frasco em nenhuma superfície e evite o contato direto com o olho. Não usar o produto se a solução mudar de cor ou ficar turva. Não utilizar o produto após o prazo de validade impresso no frasco e na embalagem externa. Não usar o produto se o lacre de segurança estiver rompido antes do primeiro uso.

Não usar o produto **Optive® ADVANCE** se a embalagem apresentar evidências de adulteração. Fechar bem o frasco imediatamente depois de usar.

Interromper o uso de **Optive® ADVANCE** e consultar um médico se sentir dor nos olhos, alterações na visão, vermelhidão continua ou irritação dos olhos, ou se a condição piorar. Pode causar turvação transitória da visão que pode prejudicar a capacidade de dirigir ou utilizar máquinas. O paciente deve esperar até que sua visão esteja normalizada antes de dirigir ou usar máquinas.

O boro tem sido associado a efeitos reprodutivos adversos em animais em doses elevadas. O produto contém 0,7% p/p de ácido bórico e 0,2% p/p de borato de sódio decahidratado com exposição total ao boro proveniente de ácido bórico e borato de sódio decahidratado inferior a 1 mg de boro/dia, o que é inferior à exposição diária permitida para adultos e crianças e significativamente inferiores aos níveis que resultam em efeitos adversos em animais. Consulte o seu médico em relação ao uso do produto se estiver grávida ou amamentando

Gravidez: Não existem dados de estudos específicos sobre o uso de **Optive® ADVANCE** durante a gravidez e lactação em humanos; no entanto, estudos em animais com CMC (carmelose sódica) não demonstraram quaisquer efeitos prejudiciais na gravidez. Estudos em animais utilizando glicerol não mostraram evidências de teratogenicidade.

Lactação: **Optive® ADVANCE** também não foi estudado em mulheres que amamentam; no entanto, não se espera uma absorção sistêmica significativa; portanto, não se prevê que seria excretado no leite materno.

Uso pediátrico: segurança e eficácia não foram demonstrados com **Optive® ADVANCE** em pacientes pediátricos

Uso geriátrico: Nenhuma diferença geral de segurança ou eficácia foi observada entre pacientes idosos e outros adultos.

Interações medicamentosas: Não há interações medicamentosas conhecidas.

Manter fora do alcance de crianças.

Conservar o produto, antes e depois de aberto, em temperatura ambiente até 30 °C.

Após aberto, válido por 90 dias.

MODO DE USO

Instile 1 ou 2 gotas de **Optive® ADVANCE** no (s) olho(s) afetado (s) conforme a necessidade. Aguardar pelo menos 5 minutos entre a administração de **Optive® ADVANCE** e outros produtos oftálmicos.

Preparando o frasco para o primeiro uso:

Etapa 1: Remova a película plástica que cobre a tampa protetora. Remova a película transparente protetora puxando para cima. Jogue fora esta película transparente. Não use se a película protetora transparente ou a aba de puxar estiverem danificadas ou faltando.

Etapa 2: Remova a aba de puxar da tampa colorida puxando a extremidade da aba para fora do frasco e rosqueando-a no sentido anti-horário. Descarte a aba de puxar

Etapa 3: Remova a tampa protetora colorida puxando-a para cima. Guarde a tampa colorida para uso posterior.

Etapa 4: Prepare o frasco para uso pela primeira vez, apertando lentamente o frasco para dispensar uma gota em um lenço de papel. Familiarize-se com o tempo e a pressão necessários para administrar uma gota. Aguarde alguns segundos depois de apertar para que a gota seja totalmente dispensada. Certifique-se de deixar o frasco inflar novamente entre as gotas. Faça isso duas vezes. Não deixe a ponta do frasco tocar no lenço de papel.

Etapa 5: O frasco está pronto para uso. Aperte o frasco suavemente no meio e deixe uma gota cair no olho afetado. Observe que pode haver um atraso de alguns segundos entre apertar o frasco e aparecer uma gota. Não aperte o frasco com muita força. Coloque 1 ou 2 gotas no(s) olho(s), conforme necessário. Depois da aplicação, deixe o frasco inflar

novamente e recoloca a tampa colorida, empurrando-a diretamente para baixo no frasco. Se usado para cuidados pós-operatórios (por exemplo, após cirurgia LASIK), é recomendado que o paciente siga as instruções do seu oftalmologista.

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO E USO

Optive® ADVANCE não requer condições especiais de armazenamento. **Optive® ADVANCE** deve ser conservado, antes e depois de aberto, em temperatura ambiente até 30 °C.

Manter o frasco fechado quando não estiver em uso. Após o uso fechar bem o frasco com a tampa do produto.

O prazo de validade de 24 meses encontra-se impresso na embalagem externa. Não utilize após a data de vencimento. Após aberto, válido por 90 dias.

Produto Estéril pelo Método de Filtração.

Registro ANVISA 82664440020

Fabricante Legal: Allergan Sales, LLC. 2525 Dupont Drive, Irvine, CA 92612, EUA

Detentor do Registro: AbbVie Farmacêutica Ltda

Av. Guido Caloi, 1935, 1º andar – bloco C – Jd. São Luis, SP – SP

Origem do produto: Estados Unidos

©2025 AbbVie. Todos os direitos reservados.

Optive e seu design são marcas registradas da Allergan, Inc., uma empresa da AbbVie



AbbVie Line
Central de Relacionamento
0800 022 2843
www.abbvie.com.br