

INSTRUÇÃO DE USO

Optive® Gel Drops

Carmelose sódica
Glicerol

Solução Oftálmica

Lubrificante ocular

USO ADULTO

APRESENTAÇÃO

Optive® Gel Drops é embalado em frasco multidose contendo 10 mL de solução oftálmica estéril para administração oftálmica.

COMPOSIÇÃO

Optive® Gel Drops contém: carmelose sódica, glicerol, eritritol, levocarnitina, ácido bórico, borato de sódio decaidratado, citrato de sódio di-hidratado, cloreto de potássio, cloreto de cálcio di-hidratado, cloreto de magnésio hexaidratado, Purite® e água purificada.

INDICAÇÕES

Optive® Gel Drops é indicado para lubrificar a superfície dos olhos e ajudar a fornecer alívio temporário do ressecamento, irritação, queimação, desconforto e/ou quaisquer outros sintomas causados pela doença do olho seco ou fatores ambientais.

CONTRAINDICAÇÕES

Optive® Gel Drops é contraindicado em pacientes com hipersensibilidade a qualquer ingrediente deste produto.

REAÇÕES ADVERSAS

As seguintes reações adversas foram identificadas durante estudos clínicos e a pós-comercialização do **Optive® Gel Drops**: visão turva, secreção ocular, irritação ocular, edema das pálpebras, sensação de corpo estranho nos olhos, aumento do lacrimejamento, inchaço ocular e hipersensibilidade.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Não ingerir a solução. Para evitar contaminação ou possível lesão ocular, não toque a ponta do frasco em nenhuma superfície e evite o contato direto com o olho. Não usar o produto se a solução mudar de cor ou ficar turva. Não utilizar o produto após o prazo de validade impresso no frasco e na embalagem externa. Não usar o produto se o lacre de segurança estiver rompido antes do primeiro uso.

Não usar o produto **Optive® Gel Drops** se a embalagem apresentar evidências de adulteração. Fechar bem o frasco imediatamente depois de usar.

Interromper o uso de **Optive® Gel Drops** e consultar um médico se sentir dor nos olhos, alterações na visão, vermelhidão continua ou irritação dos olhos, ou se a condição piorar. Pode causar turvação transitória da visão que pode prejudicar a capacidade de dirigir ou utilizar máquinas. O paciente deve esperar até que sua visão esteja normalizada antes de dirigir ou usar máquinas.

O produto pode ser usado antes de colocar ou depois de retirar as lentes de contato.

O boro tem sido associado a efeitos reprodutivos adversos em animais em doses elevadas. O produto contém 0,7% p/p de ácido bórico e 0,2% p/p de borato de sódio decaidratado com exposição total ao boro proveniente de ácido bórico e borato de sódio decaidratado inferior a 1 mg de boro/dia, o que é inferior à exposição diária permitida para adultos e crianças e significativamente inferiores aos níveis que resultam em efeitos adversos em animais. Consulte o seu médico em relação ao uso do produto se estiver grávida ou amamentando

Gravidez: Não existem dados de estudos específicos sobre o uso de **Optive® Gel Drops** durante a gravidez e lactação em humanos; no entanto, estudos em animais com carmelose sódica não demonstraram quaisquer efeitos prejudiciais na gravidez. Estudos em animais utilizando glicerol não mostraram evidências de teratogenicidade.

Lactação: **Optive® Gel Drops** também não foi estudado em mulheres que amamentam; no entanto, não se espera uma absorção sistêmica significativa; portanto, não se prevê que seria excretado no leite materno.

Uso pediátrico: segurança e eficácia não foram demonstrados com **Optive® Gel Drops** em pacientes pediátricos

Uso geriátrico: Nenhuma diferença geral de segurança ou eficácia foi observada entre pacientes idosos e outros adultos.

Interações medicamentosas: Não há interações medicamentosas conhecidas.

Manter fora do alcance de crianças.

Conservar o produto, antes e depois de aberto, em temperatura ambiente não acima de 30 °C.

Após aberto, válido por 30 dias.

MODO DE USO

Instile 1 ou 2 gotas de **Optive® Gel Drops** no (s) olho(s) afetado (s) conforme a necessidade. Aguardar pelo menos 15 minutos entre a administração de **Optive® Gel Drops** e outros produtos oftálmicos.

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO E USO

Optive® Gel Drops não requer condições especiais de armazenamento. **Optive® Gel Drops** deve ser conservado, antes e depois de aberto, em temperatura ambiente não acima de 30 °C.

Manter o frasco fechado quando não estiver em uso. Após o uso fechar bem o frasco com a tampa do produto.

O prazo de validade de 24 meses encontra-se impresso na embalagem externa. Não utilize após a data de vencimento. Após aberto, válido por 30 dias.

Produto Estéril pelo Método de Filtração.

Registro ANVISA nº 82664440021

Fabricante Legal: Allergan Sales, LLC. 2525 Dupont Drive, Irvine, Califórnia 92612, Estados Unidos da América

Detentor do Registro: AbbVie Farmacêutica Ltda

Av. Guido Caloi, 1935, 1º andar – bloco C – Jardim São Luis, São Paulo – SP

Origem do produto: Estados Unidos da América

©2025 AbbVie. Todos os direitos reservados.

Optive e seu design são marcas registradas da Allergan, Inc., uma empresa da AbbVie

abbvie



AbbVie Line
Central de Relacionamento
0800 022 2843
www.abbvie.com.br

IU01